



Pflegehinweise für bre.flex Prothesen

Die tägliche Pflege Ihres Zahnersatzes spielt eine wichtige Rolle, da ungereinigte Prothesen ein Nest für unterschiedlichste Bakterien bilden, die Entzündungen des Zahnfleisches, der Mundschleimhaut und Mundgeruch verursachen können.

Die Bakterien können darüber hinaus zu ernsthaften Erkrankungen führen. Deshalb sollten Sie Ihren Zahnersatz pflegen und die bakterielle Besiedlung so gering wie möglich halten.

- **Reinigen Sie Ihre Prothese bitte täglich.**
- **Einfach unter warmen, fließendem Wasser 30 - 60 Sek. abspülen.**
- **Säubern Sie die Prothese mit einer weichen Zahnbürste und ausschließlich mit Wasser.**
- **Bitte verwenden Sie zum Reinigen keine zahnauhellenden Zahnpasten oder ähnliches, diese greifen die Oberfläche des Materials an.**
- **Nach jedem Essen sollten Sie den Mund mit lauwarmen Wasser ausspülen.**
- **Bewahren Sie Ihre Prothese in einem Wasserbad auf.**
- **Versuchen Sie nie Ihre Prothesen selbst anzupassen oder zu reparieren.**

Achim Fischer Zahntechnik | Friedlandweg 9 | 38114 Braunschweig Telefon: 0531 - 571188 |

Fax: 0531 - 571189 | E-Mail: fischer-zahntechnik@arcor.de | Homepage: www.achim-fischer-zahntechnik